


الشكل 1. الموقف والتنسيق

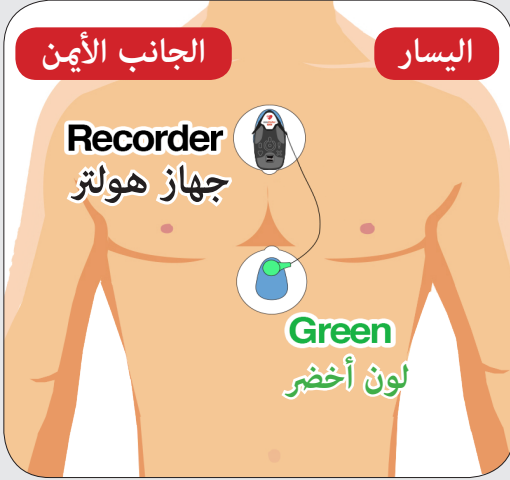

● المسجل: مركز صدرك ، في منتصف عظمة القص.

● الأخضر: منتصف صدرك ، أسفل عظم القص مباشرة.

تعليمات مهمة:



ابتعد عن رأس الدش وقم بحماية الجهاز بقطعة قماش أو بيدك أثناء الاستحمام.

لا تسبح أو تغمر هذا الجهاز في الماء.


الخطوة 1: جهاز بشرتك وعلق الأقطاب الكهربائية

1. قم بإزالة أي شعر من الصدر في المناطق التي سيتم وضع الأقطاب فيها (انظر الشكل 1).
2. نظف صدرك بالماء والصابون ثم جففه جيدًا.
3. ضع كل تسمية قطب كهربائي حسب الرسم التخطيطي (انظر الشكل 1).
4. استخدم ضغطًا ثابتًا لضمان التصاق العصا اللاصقة بشكل صحيح.


الخطوة 2: قم بتوصيل المسجل والكابلات



اضغط على زر المستشعر مرة واحدة. سيومض الضوء الأخضر. يقوم المستشعر بالتسجيل الآن.

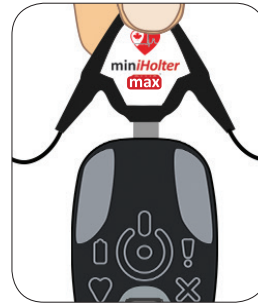

قم بتوصيل المسجل بمجموعة الكابلات.

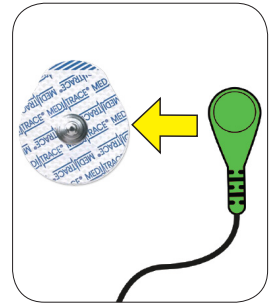

قم بتوصيل كل قطعة بالأقطاب الكهربائية المقابلة (الشكل 1).

الخطوة 3: سجل الأعراض الخاصة بك

إذا واجهت أي أعراض ، قم بتسجيلها في يوميات المريض (بالعكس). اكتب الأعراض والنشاط (مثل: التمرين والراحة وما إلى ذلك) وتاريخ ووقت كل حدث.

هذا مهم في مساعدة طبيبك في فهم الأعراض الخاصة بك.

الخطوة 4: تعليمات الإرجاع

من المهم ارتداء الشاشة طوال الفترة الزمنية المحددة. بمجرد الانتهاء ، ضع المسجل ومفكرة المريض والكابلات وجميع الملحقات الأخرى في الصندوق المرفق.

أوقف تشغيل المسجل: استمر في الضغط على زر المستشعر (انظر الشكل 2) حتى يصدر المسجل صفيراً ثلاث مرات. الحزمة جاهزة الآن للعودة.



أعد الحزمة وفقاً لتعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.



الشكل 2: إيقاف التشغيل

اسم المريض	رقم الجهاز	
تاريخ البدء (MM / DD / YYYY)	وقت البدء (HH: MM) ☐ صباحا ☐ مساء	تاريخ الإرجاع (MM / DD / YYYY)



miniHolter max
CANADIAN CARDIAC CARE

[illegible]